

Návod k použití – Priessnitzův zábal

Tento zdravotnický prostředek slouží jako podpůrná léčebná pomůcka při potížích s dýchacími cestami, zánětech krku a nachlazení. Působí termoregulačně (chladivě nebo hřejivě) na postiženou oblast.

Indikace:

- Bolest v krku, angína, kašel
- Zánět nosohltanu, laryngitida
- Bolest krční páteře (s hřejivým polštářkem)

Kontraindikace:

- Otevřené nebo infikované rány, ekzém
- Horečka bez konzultace s lékařem

Použití – mokro-suchý zábal:

1. Vnitřní bavlněný díl namočte do studené vody.
2. Vyždímejte a vložte do zábalového pásu.
3. Přiložte na krk a upevněte suchým zipem.
4. Nechte působit 15–30 minut. Nepoužívejte přes noc.

Použití – suchý hřejivý zábal:

1. Vnitřní díl zahřejte žehličkou nebo přiložte nahřátý polštářek.
2. Vložte do pásu a přiložte na krk.

Údržba:

- Praní: max. 40 °C
- Lze sušit v sušičce
- Nečistit chemicky

Skladování: V suchu, při pokojové teplotě. Chraňte před sluncem.

Výrobce: BOK&LK s.r.o. | IČO: 28731417 | Vyrobeno v ČR | www.priessnitzuvzabal.cz



CE – zdravotnický prostředek třídy I

