



VÍCEÚČELOVÁ ZÁBALOVÁ DEKA

NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

Před použitím výrobku čtěte pozorně příbalový leták.

Priessnitzův zábal pomáhá při:

- snížení horečky
- při zánětu průdušek s horečkou
- nachlazení s horečkou

Suchý teplý zábal – používáme k prohřátí celého těla.



Priessnitzův zábal je krátkodobě studený zábal, který způsobuje hloubkové lokální prokrvení za účelem urychlení hojivých procesů v těle. Regenerace po svalové zátěži. Neměl by se přikládat na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém apod.. Aplikaci u dětí vždy konzultujte s lékařem. Priessnitzův zábal je léty ověřený a osvědčený přírodní postup, který využívaly naši předkové od dob jeho objevení Vincenzem Priessnitzem (1799–1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Priessnitzův zábal je ověřenou procedurou, která napomáhá ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím k urychlení hojivých procesů v těle a postupné úlevě od nepříjemných pocitů. Jedná se o studený zapařovací zábal.

Mokrý zábal: prostěradlo, které není součástí namočte do studené vody, řádně vyždímejte a omotejte kolem těla, poté použijte zábalovou deku. Aplikujeme 10 - 20 minut. Po aplikaci zábalu je nutná přestávka. Použijte 1-2 denně, případně se poradte se svým lékařem. V případě použití zábalu u malých dětí doporučujeme konzultaci s lékařem. U dětí volíme méně studenou vodu.

Suchý zábal: při odpočinku po koupeli, po solných a aromaterapeutických koupelích, při bahenních zábalech, při relaxu po fyzickém vypětí – umocní a prodlouží Váš odpočinek.

Při používání dbejte těchto zásad:

- teplota praní nesmí překročit 40 °C.
- chraňte výrobek před stykem s ostrými předměty
- při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku či po jeho odstranění

Vám nebude uznána případná reklamace

Dodržování těchto zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.



Výrobce: BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, Kadaň

IČ: 28731417, DIČ: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz



Facebook: Priessnitzův zábal



Instagram: priessnitzuv_zabal