



# VÍCEÚČELOVÝ ZÁBAL NA HRUDNÍK, BŘICHO, ZÁDA, KYČLE

## NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

Před použitím výrobku čtěte pozorně příbalový leták.

### Napomáhá při:

- nachlazení i rýmě jako Priessnitzův zábal
- suchém a dráždivém kašli
- dětských kolikách a ledvinových kolikách
- útlumu některých zánětů, např. kyčelního kloubu
- zánětu prsu



Priessnitzův zábal je krátkodobě studený zábal, který způsobuje hloubkové lokální prokrvení za účelem urychlení hojivých procesů v těle. Neměl by se přikládat na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém apod.

Priessnitzův zábal je léty ověřený a osvědčený přírodní postup, který využívaly naši předkové od dob jeho objevení Vincenzem Priessnitzem (1799–1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Priessnitzův zábal je ověřenou procedurou, která napomáhá ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím k urychlení hojivých procesů v těle a postupné úlevě od nepříjemných pocitů. Jedná se o studený zapařovací zábal.

### Dětská kolika

Pás má uprostřed všitou kapsu pro vložení třešňového polštářku, který přikládáte na břicho a ovinete kolem pasu dítěte. Nahřátý polštářek zmírňuje dětskou koliku.

### Návod k aplikaci

Vnitřní část zábalového pásu ponořte do studené vody a potom ho dobře vyždímejte. Provlékněte vnitřní díl do zábalového pásu, omotejte pás na postižené místo a upevněte suchým zipem.

### Nachlazení

Kapsu možno použít i pro další příznivě působící látky jako je např. česnek, jablko, cibule, listy bylinek apod., které působí antibakteriálně a jejich vdechování zmírňuje příznaky rýmy, kašle a celkového nachlazení.

### VÝROBCE:

**BOK&LK s.r.o.**

Čsl. Armády 42, Kadaň

IČ: 28731417, DIČ: CZ 28731417

[www.priessnitzuvzabal.cz](http://www.priessnitzuvzabal.cz)

### PRODEJCE:

Obchodní

zástupce

tel.: 725 961 975

e-mail: [objednavkybok@seznam.cz](mailto:objednavkybok@seznam.cz)

# Priessnitzovy víceúčelové zábalové pásy pro děti a dospělé

## Při používání dbejte těchto zásad:

- ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost
- suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci
- teplota praní nesmí překročit 40 °C
- chraňte výrobek před stykem s ostrými předměty
- před prvním použitím doporučujeme výrobek vyprat
- při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamáce

**Dodržování těchto zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.**

Naše víceúčelové zábalové produkty jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se svým třívrstevným složením (1, 2, 3), kdy svrchní vrstvu (1) tvoří vlastní zábal ze 100% bavlny a protialergického rouna, spodní vrstvu (3) tvoří odnímatelná vložka z tenkého savého materiálu, a mezi spodní vrstvou (3) a vrchní vrstvou (1) je uložena střední vrstva (2) nepropustná část pásu, která zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.

Naše výrobky jsou vhodné i pro děti mladší 3 let. Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

**Důležitá je pro nás KVALITA a proto jsou výrobky ručně šity v naší provozovně. K výrobě zábalových pásů jsou použity pouze kvalitní materiály české výroby.**

Jedná se o ruční výrobu, která v závěru podtrhuje originalitu a jedinečnost našich výrobků.

## Složení:

Vnější vrstva: 100% bavlna

Jádro: 50% polyester, 25% bavlna, 25% polyuretan

Vnitřní vrstva: 100% bavlna

Upínání: pásy se suchým zipem



**Výrobce: BOK&LK s.r.o.**

Čsl. Armády 42, Kadaň

IČ: 28731417, DIČ: CZ 28731417

[www.priessnitzuvzabal.cz](http://www.priessnitzuvzabal.cz)



Facebook: Priessnitzův zábal



Instagram: priessnitzuv\_zabal