

ZÁBAL NA PRŮDUŠKY



NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

Před použitím výrobku čtěte pozorně příbalový leták.

Napomáhá při: (mokré zapařování)

- Při nachlazení
- Při horečce
- Při zánětu průdušek s horečkou

Suchý - teplý zábal (doporučujeme použít hřejivé polštářky pro zvýšení účinku)

Používáme při:

- Nachlazení bez teplot
- Zánětu průdušek bez teplot
- Vlhkém kašli



Priessnitzův zábal připravíte tak, že vnitřní bavlněnou vložku vložíte do studené vody, u dětí volíme méně studenou vodu. Dobře vyždímaný bavlněný díl položíme na oblast prsou - průdušek, poté nasadíme zábal a suchými zipy upevníme přední a zadní část zábalu, aby co nejlépe přilnula k tělu. Vrchní část zábalu by měla zcela zakrýt bavlněnou vložku. Priessnitzův zábal nenechávejte působit přes noc!! Zábal se také nesmí přikládat na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém, a tak podobně. V případě aplikace zábalu u malých dětí je lépe se nejprve poradit s lékařem.

Jelikož jsou naše pásy víceúčelové, tzn. , že je možné je použít nejen jako Priessnitzův obklad, ale též jako suchý teplý zábal, naleznete u nás také nahřívací polštářky. Polštářky jsou plněné přírodními materiály v Bio kvalitě a to pohankovými slupkami či třešňovými peckami.

Suchý - teplý zábal je možný použít jako zábal samotný, ale pro zvýšení účinku tepla můžete vnitřní bavlněný díl zahřát např. žehlením. Naše doporučení je použití hřejivých polštářků, které můžete pohodlně na hřát na pár sekund v mikrovlnné troubě - konkrétně třešňové pecky.

Hřejivé polštářky z pohanky hřejí samy od sebe - přesný návod najdete v kategorii **hřejivé polštářky**.

VÝROBCE:

BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, Kadaň

IČ: 28731417, DIČ: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz

PRODEJCE:

Obchodní

zástupce

tel.: 725 961 975

e-mail: objednavkybok@seznam.cz

"Priessnitzův" Zábal na průdušky

Při používání dbejte těchto zásad:

- ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost
- suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci
- teplota praní nesmí překročit 40 °C
- chraňte výrobek před stykem s ostrými předměty
- před prvním použitím doporučujeme výrobek vyprat
- při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamacce

Dodržování těchto zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše víceúčelové zábalové produkty jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se svým třívrstevným složením (1, 2, 3), kdy svrchní vrstvu (1) tvoří vlastní zábal ze 100% bavlny a protialergického rouna, spodní vrstvu (3) tvoří odnímatelná vložka z tenkého savého materiálu, a mezi spodní vrstvou (3) a vrchní vrstvou (1) je uložena střední vrstva (2) nepropustná část pásu, která zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.

Naše výrobky jsou vhodné i pro děti mladší 3 let. Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

Důležitá je pro nás KVALITA a proto jsou výrobky ručně šity v naší provozovně. K výrobě zábalových pásů jsou použity pouze kvalitní materiály české výroby.

Jedná se o ruční výrobu, která v závěru podtrhuje originalitu a jedinečnost našich výrobků.

Složení:

Materiál - vnitřní: 100% bavlna

Materiál - vnější: Barvená tkanina typu oxford



Výrobce: BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, Kadaň

IČ: 28731417, DIČ: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz



Facebook: Priessnitzův zábal



Instagram: priessnitzuv_zabal