

Univerzální víceúčelový zábal na krk a šíji



NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

Před použitím výrobku čtěte pozorně příbalový leták.

Priessnitzův zábal pomáhá při:

- bolestech a škrábání v krku
- chrapotu a kašli
- angíně a laryngitidě

Suchý - teplý zábal pomáhá při:

- bolestech krční páteře

Doporučujeme pro děti od tří let až po dospělé.



Bolest v krku



Bolest hlavy



Bolest zubů a uší

Priessnitzův zábal je krátkodobě studený zábal, který způsobuje hloubkové lokální prokrvení za účelem urychlení hojivých procesů v těle. **Priessnitzův zábal nenechávejte působit přes noc, nepřikládajte na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém apod.** Priessnitzův zábal je léty ověřený a osvědčený přírodní postup, který využívaly naši předkové od dob jeho objevení Vincenzem Priessnitzem (1799–1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Priessnitzův zábal je ověřenou procedurou, která napomáhá ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím k urychlení hojivých procesů v těle a postupné úlevě od nepříjemných pocitů. Jedná se o studený zapařovací zábal.

Návod k použití výrobku

1. Vyjměte vnitřní díl zábalového pásu a namočte jej do studené vody, poté vyždímejte.
2. Namočený díl vraťte zpět do zábalového pásu podvlečením pod pásy.
3. Takto připravený zábal upevněte kolem krku pomocí suchého zipu.

Dále můžete vnitřní kapsu uvnitř bavlněné vložky využít k vložení nadrobno nakrájené cibule, rýmovníku atd.

Zábal aplikujte vždy přímo na pokožku, přičemž dbejte těsného přilnutí.

Co se děje v těle po přiložení Priessnitzova zábalu

Po přiložení studeného, vlhkého zábalu pod nepropustnou a suchou vrstvu proběhnou tři fyziologické fáze

- Hypotermická fáze (cca 10 - 20 minut): místo se ochladí, cévy se stáhnou a sníží se prokrvení – to pomáhá u akutních otoků a horečky.
- Izotermická fáze (cca 20 - 30 minut): teplota se vyrovnává, cévy se začínají rozšiřovat a zvyšuje se průtok krve.
- Hypertermická fáze (cca 30 - 40 minut): oblast se začne přehřívat, výrazně se prokrví, nastartují se hojivé procesy, uvolňuje se svalové napětí a posiluje lokální imunita.

Délka použití zábalu:

Zábal nechte působit cca 20 až 60 minut. Po aplikaci zábalu je nutná přestávka. Opakujte do odeznění potíží, případně se poraďte se svým lékařem. **V případě použití zábalu u malých dětí doporučujeme konzultaci s lékařem.**

Při používání dbejte těchto zásad:

- ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost
- suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci
- teplota praní nesmí překročit 40 °C
- chraňte výrobek před stykem s ostrými předměty
- před prvním použitím doporučujeme výrobek vyprat
- při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace

Dodržování těchto zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše víceúčelové zábalové produkty jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se svým třívrstevným složením (1, 2, 3), kdy svrchní vrstvu (1) tvoří vlastní zábal ze 100% bavlny a protialergického rouna, spodní vrstvu (3) tvoří odnímatelná vložka z tenkého savého materiálu, a mezi spodní vrstvou (3) a vrchní vrstvou (1) je uložena střední vrstva (2) nepropustná část pásu, která zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.

Tento výrok vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek.

Důležitá je pro nás kvalita a proto jsou výrobky ručně šity v naší provozovně. K výrobě zábalových pásů jsou použity pouze kvalitní materiály české výroby. Jedná se o ruční výrobu, která v závěru podtrhuje originalitu a jedinečnost našich výrobků.

Univerzální víceúčelový zábal na krk a šíji přináší příjemnou úlevu při bolesti v krku, uší, zubů i bolesti krční páteře.

Zábal lze také použít i jako suchý teplý obklad v kombinaci s naším podélným nahřívacím polštářkem. Nabízíme jej ve dvou variantách – **plněný třešňovými peckami, BIO pohankovými slupkami.**

Složení:

Vnější vrstva: 100% bavlna

Jádro: 50% polyester, 25% bavlna, 25% polyeretan

Vnitřní vrstva: 100% bavlna

Upínání: pásky se suchým zipem



Výrobce: BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, Kadaň

IČ: 28731417, DIČ: CZ 28731417

Tel: +420 725 961 975

www.priessnitzuvzabal.cz



Facebook: Priessnitzův zábal



Instagram: priessnitzuv_zabal