



Mehrzweck-Wickeltuch für Brust, Bauch, Rücken und Hüfte

GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Hilft bei:

- Erkältungen
- trockener und reizender Husten
- Säuglingskoliken und Nierenkoliken
- Verringerung bestimmter Entzündungen, z. B. der Hüftgelenke



Der Priessnitz-Verband ist ein kurzzeitig anzuwendender Kälteverband, der die lokale Durchblutung anregt und so die Heilungsprozesse im Körper beschleunigt. Er sollte nicht auf infizierte Bereiche, schlecht heilende Wunden, Hauterkrankungen wie Ekzeme usw. angewendet werden.

Der Priessnitz-Wickel ist eine bewährte und traditionelle Heilmethode, die bereits von unseren Vorfahren seit ihrer Entdeckung durch Vincenzo Priessnitz (1799–1851), den Begründer der sogenannten Hydrotherapie, angewendet wurde. Der Priessnitz-Wickel fördert nachweislich die Durchblutung im betroffenen Bereich, beschleunigt so die Heilungsprozesse im Körper und lindert Beschwerden. Es handelt sich um einen Kaltdampfwickel.

Anwendungshinweise

Tauchen Sie die Innenseite des Verbandes in kaltes Wasser und wringen Sie ihn anschließend gut aus. Fädeln Sie die Innenseite in den Verband ein, wickeln Sie den Verband um die betroffene Stelle und fixieren Sie ihn mit dem Klettverschluss. Bei der Anwendung des Wickels bei kleinen Kindern empfiehlt es sich, zuvor einen Arzt zu konsultieren.

Säuglingskoliken

Der Gürtel hat eine mittig eingenähte Tasche für ein Kirschkissen, das man auf den Bauch legt und um die Taille des Babys wickelt. Das Wärmekissen lindert Babykoliken. Bei der Anwendung des Wickels bei kleinen Kindern empfiehlt es sich, zuvor einen Arzt zu konsultieren.

Kalt

Der Beutel kann auch für andere nützliche Substanzen wie Knoblauch, Apfel, Zwiebel, Kräuterblätter usw. verwendet werden, die antibakterielle Wirkungen haben und deren Inhalation Symptome wie Schnupfen, Husten und allgemeine Erkältung lindert.

HERSTELLER:

BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, 432 01 Kadaň

ID: 28731417

Umsatzsteuer-ID: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz/de

VERKÄUFER:

Außendienstmitarbeiter

Tel.: +420 725 961 975

WhatsApp verfügbar

E-Mail: objednavkybok@seznam.cz



Priessnitz Mehrzweck-Tragetücher für Kinder und Erwachsene



Bitte beachten Sie bei der Verwendung die folgenden Richtlinien:

- Wählen Sie die richtige Größe in Zusammenarbeit mit professionellen Verkäufern.
- Die Klettverschlüsse des Produkts müssen nach dem Waschen geschlossen und sauber gehalten werden, da sie sonst ihre Funktion verlieren.
- Die Waschtemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen.
- Wir empfehlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch zu waschen.
- Wenn Sie die Symbole auf dem Produktinformationsetikett nicht beachten oder dieses entfernt wird, werden etwaige Reklamationen nicht akzeptiert.

Wenn Sie diese Grundsätze befolgen, können Sie unser Produkt problemlos und zu Ihrer Zufriedenheit nutzen.

Unsere Mehrzweck-Wickelprodukte sind primär für therapeutische, Rehabilitations- und Entspannungszwecke bestimmt. Sie zeichnen sich durch ihren dreilagigen Aufbau (1, 2, 3) aus. Die oberste Schicht (1) besteht aus dem Wickel selbst aus 100 % Baumwolle und antiallergischem Fleece. Die unterste Schicht (3) besteht aus einem herausnehmbaren Einsatz aus dünnem, saugfähigem Material. Zwischen der unteren Schicht (3) und der obersten Schicht (1) befindet sich die mittlere Schicht (2) – ein wasserdichter Teil des Gurtes, der die Wasserdichtigkeit des Materials gewährleistet und gleichzeitig die Wärme speichert.

Unsere Produkte sind auch für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Diese Aussage wurde vom staatlichen Gesundheitsinstitut auf Grundlage erfolgreicher Tests abgegeben.

Qualität ist uns wichtig, deshalb werden die Produkte in unserer Manufaktur von Hand genäht. Für die Herstellung der Tragetücher verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien tschechischer Produktion.

Es handelt sich um eine handgefertigte Produktion, was letztendlich die Originalität und Einzigartigkeit unserer Produkte unterstreicht.

Zusammensetzung:

Außenschicht: 100 % Baumwolle; Kern: 50 % Polyester, 25 % Baumwolle, 25 % Polyurethan; Innenschicht: 100 % Baumwolle; Verschluss: Klettverschlüsse



Facebook: Priessnitzuv zabal



Instagram: priessnitzuv_zabal