

Halswickel



GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Hilft bei:

- Halsschmerzen und Kratzen im Hals
- Heiserkeit und Husten
- Angina und Kehlkopfentzündung
- Schmerzen der Halswirbelsäule usw.



Der Priessnitz-Wickel ist ein kurzfristig kalt wirkender Wickel, der eine intensive lokale Durchblutung fördert und dadurch die Heilungsprozesse im Körper unterstützen kann. Lassen Sie den Priessnitz-Wickel nicht über Nacht angelegt. Legen Sie ihn nicht auf infizierte Stellen, schlecht heilende Wunden oder Hauterkrankungen wie Ekzeme und Ähnliches. Der Priessnitz-Wickel ist eine seit Jahren bewährte natürliche Methode, die bereits unsere Vorfahren seit ihrer Entdeckung durch Vincenz Priessnitz (1799–1851), den Begründer der sogenannten Hydrotherapie, nutzten. Der Priessnitz-Wickel ist eine bewährte Anwendung, die dazu beitragen kann, die Durchblutung der betroffenen Stelle zu verbessern und dadurch Heilungsprozesse im Körper zu unterstützen sowie unangenehme Beschwerden schrittweise zu lindern. Es handelt sich um einen kalten, feuchten Umschlag.

Gebrauchsanweisung

1. Nehmen Sie den Innenteil des Wickelbandes heraus, tauchen Sie ihn in kaltes Wasser und wringen Sie ihn anschließend aus.
2. Legen Sie den angefeuchteten Teil wieder in das Wickelband ein, indem Sie ihn unter die Bänder schieben.
3. Befestigen Sie den so vorbereiteten Wickel mit dem Klettverschluss um den Hals.

Außerdem können Sie die Innentasche in der Baumwolleinlage nutzen, um fein gehackte Zwiebeln, Rýmovník usw.

Legen Sie den Wickel stets direkt auf die Haut und achten Sie darauf, dass er eng am Körper anliegt.

Was im Körper nach dem Anlegen eines Priessnitz-Wickels geschieht

Nach dem Anlegen eines kalten, feuchten Wickels unter einer wasserundurchlässigen und trockenen Schicht durchläuft der Körper drei physiologische Phasen:

- **Hypothermische Phase:** Die betroffene Stelle kühlt ab, die Blutgefäße verengen sich und die Durchblutung nimmt ab – dies kann bei akuten Schwellungen und Fieber hilfreich sein.
- **Isothermische Phase:** Die Temperatur gleicht sich aus, die Blutgefäße beginnen sich zu erweitern und der Blutfluss nimmt zu.
- **Hyperthermische Phase:** Der Bereich beginnt sich zu erwärmen, wird deutlich stärker durchblutet, Heilungsprozesse werden angeregt, Muskelverspannungen können sich lösen und die lokale Immunabwehr wird unterstützt.

Anwendungsdauer des Wickels:

Lassen Sie den Wickel etwa 20 bis 60 Minuten einwirken. Nach der Anwendung ist eine Pause erforderlich. Wiederholen Sie die Anwendung, bis die Beschwerden nachlassen; gegebenenfalls konsultieren Sie Ihren Arzt. Bei der Anwendung des Wickels bei kleinen Kindern empfehlen wir, vorher einen Arzt zu konsultieren.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung die folgenden Richtlinien:

- Wählen Sie die richtige Größe in Zusammenarbeit mit professionellen Verkäufern.
- Die Klettverschlüsse des Produkts müssen nach dem Waschen geschlossen und sauber gehalten werden, da sie sonst ihre Funktion verlieren.
- Die Waschtemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen.
- Wir empfehlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch zu waschen.
- Wenn Sie die Symbole auf dem Produktinformationsetikett nicht beachten oder dieses entfernt wird, werden etwaige Reklamationen nicht akzeptiert.

Wenn Sie diese Grundsätze befolgen, können Sie unser Produkt problemlos und zu Ihrer Zufriedenheit nutzen.

Unsere Mehrzweck-Wickelprodukte sind primär für therapeutische, Rehabilitations- und Entspannungszwecke bestimmt. Sie zeichnen sich durch ihren dreilagigen Aufbau (1, 2, 3) aus. Die oberste Schicht (1) besteht aus dem Wickel selbst aus 100 % Baumwolle und antiallergischem Fleece. Die unterste Schicht (3) besteht aus einem herausnehmbaren Einsatz aus dünnem, saugfähigem Material. Zwischen der unteren Schicht (3) und der obersten Schicht (1) befindet sich die mittlere Schicht (2) – ein wasserdichter Teil des Gurtes, der die Wasserdichtigkeit des Materials gewährleistet und gleichzeitig die Wärme speichert.

Qualität ist uns wichtig, deshalb werden die Produkte in unserer Manufaktur von Hand genäht. Für die Herstellung der Tragetücher verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien tschechischer Produktion.

Es handelt sich um eine handgefertigte Produktion, was letztendlich die Originalität und Einzigartigkeit unserer Produkte unterstreicht.

Der Wickel kann auch als trockene, warme Auflage in Kombination mit unserem länglichen Wärmekissen verwendet werden. Wir bieten es in zwei Varianten an – **gefüllt mit Kirschkernen** oder **BIO-Buchweizenschalen**.



POL-POD-T-8-40

Zusammensetzung:

Außenschicht: 100% Baumwolle; Kern: 50% Polyester, 25%
Baumwolle, 25 % Polyurethan; Innenschicht: 100 %
Baumwolle; Verschluss: Klettverschlüsse

BOK & LK s.r.o.
IČO: 28731417

HERSTELLER:

BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, 432 01 Kadaň

ID: 28731417

Umsatzsteuer-ID: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz/de

VERKÄUFER:

Vertrieb

Tel.: +420 725 961 975

WhatsApp verfügbar

E-Mail: objednavkybok@seznam.cz



Facebook: Priessnitzuv zabal



Instagram: priessnitzuv_zabal