

Der Nierengurt



GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Hilft bei:

- Erkältungen
- Schmerzen der Lendenwirbelsäule
- Menstruationsbeschwerden
- Nierenschmerzen
- Schmerzen der Harnwege



Der Wickel dient zum Wärmen von Rücken und Bauch als trockener Wärmeumschlag.

Legen Sie ihn um die Taille und befestigen Sie ihn mit den Klettverschlüssen, damit der Gürtel nicht verrutscht. Der trockene Wärmeumschlag hilft bei Rückenschmerzen und Menstruationsbeschwerden, schützt außerdem vor Auskühlung und kann bei Beschwerden der Harnwege sowie bei Nierenentzündungen unterstützend wirken.

Anwendungsdauer des Wickels

Lassen Sie den Wickel etwa **20 bis 60 Minuten** einwirken. Nach der Anwendung ist eine Pause erforderlich. Wiederholen Sie die Anwendung höchstens **dreimal täglich**, bis die Beschwerden abklingen; konsultieren Sie gegebenenfalls Ihren Arzt.

Bei der Anwendung bei kleinen Kindern empfehlen wir, vorher einen Arzt zu konsultieren. Lassen Sie den Wickel nicht über Nacht einwirken. Nicht auf infizierte Stellen, schlecht heilende Wunden oder Hauterkrankungen wie Ekzeme auflegen.

Farben und Größen: S/M, L/XL

- Taillenumfang: S/M 66–96 cm, L/XL 80–120 cm
- Höhe: S/M 22 cm, L/XL 25 cm
- Länge: S/M 56 cm, L/XL 68 cm
- Material: 100% Baumwolle
- Verschluss: Klettverschluss

Ohne innere Baumwolleinlage; geeignet für trockene Wärme.
Waschbar bei **40 °C**.



BOK & LK s.r.o.
IČO: 28731417

HERSTELLER:

BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, 432 01 Kadaň

ID: 28731417

Umsatzsteuer-ID: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz/de

VERKÄUFER:

Vertrieb

Tel.: +420 725 961 975

WhatsApp verfügbar

E-Mail: objednavkybok@seznam.cz



Facebook: Priessnitzuv zabal



Instagram: priessnitzuv_zabal