

Bronchialwickel



GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Hilft bei:

- Wenn Sie eine Erkältung haben
- Mit Fieber
- Bei Bronchitis mit Fieber



Trockene, warme Wickel (wir empfehlen die Verwendung von Heizkissen, um den Effekt zu verstärken)

Wir verwenden es für:

- Erkältung ohne Fieber
- Bronchitis ohne Fieber
- feuchter Husten



Zur Vorbereitung des Priessnitz-Verbandes legen Sie das innere Wattepad in kaltes Wasser; für Kinder verwenden Sie weniger kaltes Wasser. Legen Sie das gut ausgewrungene Wattepad auf den Brustbereich – die Bronchien – und ziehen Sie anschließend den Verband an. Befestigen Sie Vorder- und Rückseite mit dem Klettverschluss, sodass der Verband optimal am Körper anliegt. Der obere Rand des Verbandes sollte das Wattepad vollständig bedecken. Lassen Sie den Priessnitz-Verband nicht über Nacht angelegt! Er sollte außerdem nicht auf infizierte Stellen, schlecht heilende Wunden, Hauterkrankungen wie Ekzeme usw. aufgelegt werden. Bei der Anwendung des Verbandes bei Kleinkindern ist es ratsam, vorher einen Arzt zu konsultieren.

Da unsere Gürtel vielseitig einsetzbar sind, also nicht nur als Priessnitz-Kompresse, sondern auch als trockene Wärmepackung verwendet werden können, bieten wir auch Heizkissen an. Die Kissen sind mit natürlichen Materialien in Bio-Qualität gefüllt, wie zum Beispiel Buchweizenschalen oder Kirschkernen.

Die Trocken-Wärme-Wickeldecke kann allein verwendet werden. Um den Wärmeeffekt zu verstärken, kann die Baumwollinnenseite erwärmt werden, z. B. durch Bügeln. Wir empfehlen die Verwendung von Wärmekissen, die sich bequem einige Sekunden in der Mikrowelle erwärmen lassen – insbesondere Kirschkerne.



Die Wärmekissen

Buchweizen-Heizkissen erwärmen sich selbst - eine detaillierte Anleitung finden Sie in der Kategorie **Heizkissen**.



Für Erwachsene



Für Kinder

„Priessnitz“-Bronchialwickel

Bitte beachten Sie bei der Verwendung die folgenden Richtlinien:

- Wählen Sie die richtige Größe in Zusammenarbeit mit professionellen Verkäufern.
- Die Klettverschlüsse des Produkts müssen nach dem Waschen geschlossen und sauber gehalten werden, da sie sonst ihre Funktion verlieren.
- Die Waschtemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen.
- Wir empfehlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch zu waschen.
- Wenn Sie die Symbole auf dem Produktinformationsetikett nicht beachten oder dieses entfernt wird, werden etwaige Reklamationen nicht akzeptiert.

Wenn Sie diese Grundsätze befolgen, können Sie unser Produkt problemlos und zu Ihrer Zufriedenheit nutzen.

Unsere Mehrzweck-Wickelprodukte sind primär für therapeutische, Rehabilitations- und Entspannungszwecke bestimmt. Sie zeichnen sich durch ihren dreilagigen Aufbau (1, 2, 3) aus. Die oberste Schicht (1) besteht aus dem Wickel selbst aus 100 % Baumwolle und antiallergischem Fleece. Die unterste Schicht (3) besteht aus einem herausnehmbaren Einsatz aus dünnem, saugfähigem Material. Zwischen der unteren Schicht (3) und der obersten Schicht (1) befindet sich die mittlere Schicht (2) – ein wasserdichter Teil des Gurtes, der die Wasserdichtigkeit des Materials gewährleistet und gleichzeitig die Wärme speichert.

Unsere Produkte sind auch für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Diese Aussage wurde vom staatlichen Gesundheitsinstitut auf Grundlage erfolgreicher Tests abgegeben.

Qualität ist uns wichtig, deshalb werden die Produkte in unserer Manufaktur von Hand genäht. Für die Herstellung der Tragetücher verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien tschechischer Produktion.

Es handelt sich um eine handgefertigte Produktion, was letztendlich die Originalität und Einzigartigkeit unserer Produkte unterstreicht.

Zusammensetzung:

Material – innen: 100 % Baumwolle

Material – außen: gefärbtes Oxford-Gewebe



HERSTELLER:

BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, 432 01 Kadaň

ID: 28731417

Umsatzsteuer-ID: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz/de

VERKÄUFER:

Vertrieb

Tel.: +420 725 961 975

WhatsApp verfügbar

E-Mail: objednavkybok@seznam.cz



Facebook: Priessnitzuv zabal



Instagram: priessnitzuv_zabal