

Mehrzweckwickel für Schultergelenke



GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Hilft bei:

- rheumatischen Beschwerden
- Entspannung nach Muskelbelastung
- Schmerzen in den Schultern und im Rücken im Bereich des Nackens und der Schulterblätter
- Erwärmung der Halswirbelsäule und der Schultern



Der Priessnitz-Verband ist ein kurzzeitig anzuwendender Kälteverband, der die lokale Durchblutung anregt und so die Heilungsprozesse im Körper beschleunigt. Er sollte nicht auf infizierte Bereiche, schlecht heilende Wunden, Hauterkrankungen wie Ekzeme usw. angewendet werden.

Der Priessnitz-Wickel ist eine bewährte und traditionelle Heilmethode, die bereits von unseren Vorfahren seit ihrer Entdeckung durch Vincenzo Priessnitz (1799–1851), den Begründer der sogenannten Hydrotherapie, angewendet wurde. Der Priessnitz-Wickel fördert nachweislich die Durchblutung im betroffenen Bereich, beschleunigt so die Heilungsprozesse im Körper und lindert Beschwerden. Es handelt sich um einen Kaltdampfwickel.

Gebrauchsanweisung:

- Nehmen Sie den Innenteil des Wickelbandes heraus, tauchen Sie ihn in kaltes Wasser und wringen Sie ihn anschließend aus.
- Legen Sie den angefeuchteten Innenteil wieder in das Wickelband ein.
- Legen Sie das Schulterband an und ziehen Sie den Klettverschluss nach Bedarf fest.
- Legen Sie den Wickel stets direkt auf die Haut und achten Sie darauf, dass er eng am Körper anliegt.

Was im Körper nach dem Anlegen eines Priessnitz-Wickels geschieht

Nach dem Anlegen eines kalten, feuchten Wickels unter einer undurchlässigen, trockenen Schicht durchläuft der Körper drei physiologische Phasen.

- Hypothermische Phase: Die betroffene Stelle kühlt ab, die Blutgefäße verengen sich und die Durchblutung nimmt ab – dies kann bei akuten Schwellungen und Fieber hilfreich sein.
- Isothermische Phase: Die Temperatur gleicht sich aus, die Blutgefäße beginnen sich zu erweitern und der Blutfluss nimmt zu.
- Hyperthermische Phase: Der Bereich beginnt sich zu erwärmen, wird stärker durchblutet, Heilungsprozesse werden angeregt, Muskelverspannungen können sich lösen und die lokale Immunabwehr wird unterstützt.

Anwendungsdauer des Wickels:

Lassen Sie den Wickel etwa 20 bis 60 Minuten einwirken. Nach jeder Anwendung ist eine Pause erforderlich. Wiederholen Sie die Anwendung höchstens dreimal täglich, bis die Beschwerden nachlassen; gegebenenfalls konsultieren Sie Ihren Arzt. Bei der Anwendung des Wickels bei kleinen Kindern empfehlen wir, die Anwendung vorher mit einem Arzt abzusprechen.

Bitte beachten Sie bei der Verwendung die folgenden Richtlinien:

- Wählen Sie die richtige Größe in Zusammenarbeit mit professionellen Verkäufern.
- Die Klettverschlüsse des Produkts müssen nach dem Waschen geschlossen und sauber gehalten werden, da sie sonst ihre Funktion verlieren.
- Die Waschtemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen.
- Wir empfehlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch zu waschen.
- Wenn Sie die Symbole auf dem Produktinformationsetikett nicht beachten oder dieses entfernt wird, werden etwaige Reklamationen nicht akzeptiert.

Wenn Sie diese Grundsätze befolgen, können Sie unser Produkt problemlos und zu Ihrer Zufriedenheit nutzen.

Unsere Mehrzweck-Wickelprodukte sind insbesondere für mögliche therapeutische, rehabilitative und entspannende Anwendungen bestimmt. Sie zeichnen sich durch ihren dreischichtigen Aufbau (1, 2, 3) aus: Die oberste Schicht (1) besteht aus dem Wickel selbst, aus 100% Baumwolle und antiallergischem Vlies. Die unterste Schicht (3) besteht aus einer herausnehmbaren Einlage aus dünnem, saugfähigem Material. Zwischen der unteren Schicht (3) und der oberen Schicht (1) befindet sich die mittlere Schicht (2) – ein wasserundurchlässiger, aber atmungsaktiver Teil des Bandes, der verhindert, dass Wasser durch das Material dringt, und gleichzeitig die Wärme speichert.

Diese Aussage wurde vom Staatlichen Gesundheitsinstitut der Tschechischen Republik auf Grundlage erfolgreich durchgeführter Prüfungen abgegeben. Qualität ist uns wichtig, deshalb werden unsere Produkte in unserer Betriebsstätte von Hand genäht. Für die Herstellung der Wickelbänder verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien aus tschechischer Produktion. Es handelt sich um Handarbeit, die die Originalität und Einzigartigkeit unserer Produkte unterstreicht.

Lassen Sie den Priessnitz-Wickel nicht über Nacht angelegt! Der Wickel darf außerdem nicht auf infizierte Stellen, schlecht heilende Wunden oder Hauterkrankungen wie Ekzeme und Ähnliches aufgelegt werden. Bei der Anwendung des Wickels bei Kleinkindern empfehlen wir, vorher einen Arzt zu konsultieren.

Zusammensetzung:

Außenschicht: 100% Baumwolle

Kern: 50% Polyester, 25% Baumwolle, 25% Polyurethan

Innenschicht: 100% Baumwolle

Befestigung: Bänder mit Klettverschluss



HERSTELLER:

BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, 432 01 Kadaň

ID: 28731417

Umsatzsteuer-ID: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz/de

VERKÄUFER:

Vertrieb

Tel.: +420 725 961 975

WhatsApp verfügbar

E-Mail: objednavkybok@seznam.cz



Facebook: Priessnitzuv zabal



Instagram: priessnitzuv_zabal