

Universal – Halswickel



GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Hilft bei:

- Halsschmerzen und Kratzen im Hals
- Heiserkeit und Husten
- Schmerzen in der Halswirbelsäule

Eine Größe passt Frauen, Männern und Kindern ab 3 Jahren.



Der Priessnitz-Verband ist ein kurzzeitig anzuwendender Kälteverband, der die lokale Durchblutung anregt und so die Heilungsprozesse im Körper beschleunigt. Er sollte nicht auf infizierte Bereiche, schlecht heilende Wunden, Hauterkrankungen wie Ekzeme usw. angewendet werden.

Der Priessnitz-Wickel ist eine bewährte und traditionelle Heilmethode, die bereits von unseren Vorfahren seit ihrer Entdeckung durch Vincenzo Priessnitz (1799–1851), den Begründer der sogenannten Hydrotherapie, angewendet wurde. Der Priessnitz-Wickel fördert nachweislich die Durchblutung im betroffenen Bereich, beschleunigt so die Heilungsprozesse im Körper und lindert Beschwerden. Es handelt sich um einen Kaltdampfwickel.

Produktanleitung

1. Nehmen Sie den inneren Einsatz des Wickelgürtels heraus und tauchen Sie ihn in kaltes Wasser, anschließend wringen Sie ihn aus.
2. Stecken Sie den durchnässten Teil wieder in den Wickelgürtel, indem Sie ihn unter die Riemen schieben.
3. Befestigen Sie die so vorbereitete Priessnitz mit Klettverschluss um Ihren Hals.

Bei einer Erkältung oder einem Husten kann die Innentasche der Bandage genutzt werden, um fein gehackte Zwiebeln einzuführen, die mit ihrer antiseptischen Wirkung die Behandlung beschleunigen und eine verstopfte Nase befreien.

Den Wickel immer direkt auf die Haut auflegen und darauf achten, dass er dicht anliegt.

Was im Körper nach dem Anlegen eines Priessnitz-Wickels passiert

Nach dem Anlegen eines kalten, feuchten Wickels unter einer undurchlässigen und trockenen Deckschicht laufen im Körper drei physiologische Phasen ab.

Hypothermische Phase (ca. 10–20 Minuten):

Die betroffene Stelle kühlt ab, die Blutgefäße ziehen sich zusammen und die Durchblutung nimmt ab.

Dies hilft bei akuten Schwellungen und Fieber.

Isothermische Phase (ca. 20–30 Minuten):

Die Temperatur in der Wickelzone gleicht sich allmählich aus, die Gefäße beginnen sich zu erweitern und der Blutfluss nimmt zu.

Hyperthermische Phase (ca. 30–40 Minuten):

Die behandelte Region wird leicht überwärmt, die Durchblutung steigt deutlich an, Heilungsprozesse werden angeregt, Muskelverspannungen lösen sich und die lokale Immunabwehr wird gestärkt.

Dauer der Anwendung des Wickels:

Den Wickel etwa 20 - 60 Minuten wirken lassen. Nach jeder Anwendung ist eine Pause erforderlich. Wiederholen Sie die Anwendung, bis die Beschwerden nachlassen, oder sprechen Sie gegebenenfalls mit Ihrem Arzt. **Bei der Anwendung des Wickels bei kleinen Kindern empfehlen wir, dies vorher mit einem Arzt zu besprechen.**

Bitte beachten Sie bei der Verwendung die folgenden Richtlinien:

- Wählen Sie die richtige Größe in Zusammenarbeit mit professionellen Verkäufern.
- Die Klettverschlüsse des Produkts müssen nach dem Waschen geschlossen und sauber gehalten werden, da sie sonst ihre Funktion verlieren.
- Die Waschtemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.
- Schützen Sie das Produkt vor dem Kontakt mit scharfen Gegenständen.
- Wir empfehlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch zu waschen.
- Wenn Sie die Symbole auf dem Produktinformationsetikett nicht beachten oder dieses entfernt wird, werden etwaige Reklamationen nicht akzeptiert.

Wenn Sie diese Grundsätze befolgen, können Sie unser Produkt problemlos und zu Ihrer Zufriedenheit nutzen.

Unsere Mehrzweck-Wickelprodukte sind primär für therapeutische, Rehabilitations- und Entspannungszwecke bestimmt. Sie zeichnen sich durch ihren dreilagigen Aufbau (1, 2, 3) aus. Die oberste Schicht (1) besteht aus dem Wickel selbst aus 100 % Baumwolle und antiallergischem Fleece. Die unterste Schicht (3) besteht aus einem herausnehmbaren Einsatz aus dünnem, saugfähigem Material. Zwischen der unteren Schicht (3) und der obersten Schicht (1) befindet sich die mittlere Schicht (2) – ein wasserdichter Teil des Gurtcs, der die Wasserdichtigkeit des Materials gewährleistet und gleichzeitig die Wärme speichert.

Qualität ist uns wichtig, deshalb werden die Produkte in unserer Manufaktur von Hand genäht. Für die Herstellung der Tragetücher verwenden wir ausschließlich hochwertige Materialien tschechischer Produktion.

Es handelt sich um eine handgefertigte Produktion, was letztendlich die Originalität und Einzigartigkeit unserer Produkte unterstreicht.

Universeller Mehrzweck-Wickel für Hals und Nacken bringt wohltuende Linderung bei Schmerzen im Hals, in den Ohren, den Zähnen und bei Beschwerden der Halswirbelsäule.

Der Wickel kann auch als trockene, warme Auflage in Kombination mit unserem länglichen Wärmekissen verwendet werden. Wir bieten es in zwei Varianten an – gefüllt mit Kirschkernen oder BIO-Buchweizenschalen.

Zusammensetzung:

Außenschicht: 100% Baumwolle; Kern: 50% Polyester, 25%
Baumwolle, 25 % Polyurethan; Innenschicht: 100 %
Baumwolle; Verschluss: Klettverschlüsse



HERSTELLER:

BOK&LK s.r.o.

Čsl. Armády 42, 432 01 Kadaň

ID: 28731417

Umsatzsteuer-ID: CZ 28731417

www.priessnitzuvzabal.cz/de

VERKÄUFER:

Vertrieb

Tel.: +420 725 961 975

WhatsApp verfügbar

E-Mail: objednavkybok@seznam.cz



Facebook: Priessnitzuv zabal



Instagram: priessnitzuv_zabal