



PRIESSNITZOVY ZÁBALY PRO CELOU RODINU.

KOMBINOVANÝ ZÁBAL NA KRK A PRŮDUŠKY PRO DĚTI AŽ DOSPĚLÉ.

DOPORUČUJEME PRO DĚTI OD PĚTI LET.



Před použitím výrobku čtěte pozorně příbalový leták.
Výrobek je chráněn patentním úřadem. Jeho výroba je protizákonná.

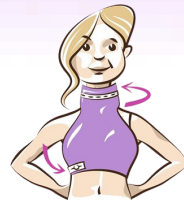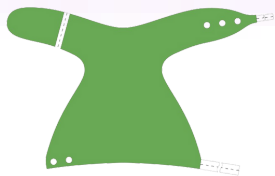

• **Priessnitzův (mokrý zapařovací) zábal na krk ulevuje při :**

- běžném bolení a škrábání v krku
- napomáhá při nachlazení, kašli nebo angíně
- tlumí zánět jícnu a nosních dutin
- pomáhá při laryngitidě
- ulevuje při suchém kašli
- **Suchý - teplý zábal:** ulevuje při bolesti krční páteře

• **Priessnitzův (mokrý zapařovací) zábal na průdušky ulevuje při:**

- Nachlazení s horečkou
- Horečce
- Zánětu průdušek s horečkou
- **Suchý - teplý zábal** (doporučujeme použít hřejivé polštářky pro zvýšení účinku) používáme při:
- Nachlazení bez teplot
- Zánětu průdušek bez teplot
- Vlhkém kašli

Návod k použití

Návod na použití Priessnitzova zábalu:

Priessnitzův zábal je krátkodobě studený obklad, který způsobuje hloubkové lokální prokrvení za účelem urychlení hojivých procesů v těle.

Vnitřní vyjimatelný bavlněný díl zábalového pásu namočte do studené vody (u dětí volíme méně studenou vodu). Dobře vyždímaný bavlněný díl vložte do zábalového pásu podvlečením pod pásky. Přiložte na tělo a upevněte poutkami s knoflíky, aby zábal co nejlépe přilnul k tělu a mohl být jeho účinek co největší. Zábal aplikujte vždy přímo na pokožku.

Priessnitzův zábal nenechávejte působit přes noc!! Zábal se také nesmí přikládat na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém, a tak podobně. V případech aplikace zábalu u malých dětí je lépe se nejprve poradit s lékařem.

Suchý - teplý zábal je možný použít jako zábal samotný, ale pro zvýšení účinku tepla můžete vnitřní bavlněný díl zahřát např. žehlením. Naše doporučení je použití hřejivých polštářků.

Délka použití zábalu: Zábal nechte působit 15 - 60 minut, opakujte do odeznění potíží, případně se poradte se svým lékařem..

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalů najdete na našem E - Shopu
www.priessnitzuvzabal.cz

Výroba: BOK&LK s.r.o. IČ: 28731417 DIČ: CZ 28731417 Čsl. Armády 42, Kadaň

PRIESSNITZOVY ZÁBALY PRO CELOU RODINU. PRO OPAKOVANÉ POUŽITÍ. KOMBINOVANÝ ZÁBAL NA KRK A PRŮDUŠKY PRO DĚTI AŽ DOSPĚLÉ



Před použitím výrobku čtete pozorně příbalový leták.
Výrobek je chráněn patentním úřadem. Jeho výroba je protizákonná.

vnitřní bavlněné díly,
který se namáčí



poutka na upevnění zábalu



Při používání dbejte těchto zásad:

- ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost
- suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené, jinak ztrácejí svoji funkci
- teplota praní nesmí překročit 40 °C
- chraňte výrobek před stykem s ostrými předměty
- před prvním použitím doporučujeme výrobek vyprat
- při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamacie
- Dodržování těchto zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše víceúčelové zábalové produkty jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se svým třívrstevným složením (1, 2, 3), kdy svrchní vrstvu (1) tvoří vlastní zábal ze 100% bavlny a protialergického rouna, spodní vrstvu (3) tvoří odnímatelná vložka z tenkého savého materiálu, a mezi spodní vrstvou (3) a vrchní vrstvou (1) je uložena střední vrstva (2) nepropustná část pásu, která zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.

Naše výrobky jsou vhodné i pro děti mladší 3 let. Tento výrobek vydal STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek. Důležitá je pro nás kvalita. Každý výrobek je originál. K výrobě zábalových pásů jsou pouze použity kvalitní materiály české výroby.

SLOŽENÍ: vnější vrstva - 100% polyester, Údržba - praní 40°C, prací prostředky bez bělících činidel, sušit v rozvěšeném stavu, doporučujeme nežehlit, případné žehlení max. na první stupeň 110°C za použití pomocné látky **jádro** : polyester, 25% bavlna, 25% polyuretan, **vnitřní vrstva**: 100% bavlna.

Upínání: pásky s knoflíky.



**Naše cesta
pro vaše zdraví**

E-mail: objednavkybok@seznam.cz

Tel: + 420 725 961 975

www.priessnitzuzabal.cz

Výroba: BOK&LK s.r.o. IČ: 28731417 DIČ: CZ 28731417 Čsl. Armády 42, Kadaň

