

## **Při používání dbejte těchto zásad:**

- › ve spolupráci s odbornými prodejci zvolte správnou velikost
- › suché zipy na výrobku je třeba prát zapnuté a udržovat nezanesené jinak ztrácejí svoji funkci
- › teplota praní nesmí překročit 40 °C
- › chraňte výrobek před stykem s ostrými předměty
- › před prvním použitím doporučujeme výrobek vyprat
- › při nedodržení symbolů uvedených na informačním štítku výrobku či po jeho odstranění Vám nebude uznána případná reklamace

Dodržování těchto zásad Vám umožní bezproblémové užívání našeho výrobku k Vaší spokojenosti.

Naše víceúčelové zábalové produkty jsou určeny zejména k léčebným, rehabilitačním a relaxačním účelům. Vyznačují se svým třívrstevným složením (1,2,3), kdy svrchní vrstvu (1) tvoří vlastní zábal ze 100% bavlny a protialergického rouna, spodní vrstvu (3) tvoří odnímatelná vložka z tenkého savého materiálu, a mezi spodní vrstvou (3) a vrchní vrstvou (1) je uložena střední vrstva (2) nepropustná část pásu, která zajistí neprůchodnost vody materiálem a zároveň udrží teplo.

Naše výrobky jsou vhodné i pro děti mladší 3 let. Tento výrok vydal STÁTNI ZDRAVOTNI ÚSTAV na základě úspěšných zkoušek. Důležitá je pro nás **KVALITA** a proto jsou výrobky ručně šity v naší provozovně. K výrobě zábalových pásů jsou použity pouze **kvalitní materiály české výroby**. Jedná se o ruční výrobu, která v závěru podtrhuje originalitu a jedinečnost našich výrobků.

## **Současné produkty na trhu**

### **✓Zábalový pás na hrudník, břicho, kyčle a záda**

při nachlazení, rýmě a kašli  
při zánětu prsu a kojení  
napomáhá účinně řešit dětské koliky  
tlumí zánět kyčelního kloubu  
napomáhá při ledvinové kolice

### **✓ Zábalový pás na krk a šíji**

úleva při běžném bolení a škrábaní v krku  
při bolestech krční páteře

### **✓Zábalový pás na lokty, kolena, lýtka**

na klouby při revmatických potížích  
při zánětu žil  
při snižování teploty

### **✓Zábalové bačkory**

při nachlazení rýmě a kašli  
při revmatických potížích a otoku  
při lázeňské a kosmetické proceduře

### **✓Zábal ramenního kloubu**

při revmatických potížích  
při nachlazení

### **✓Zábalové rukavice**

•při revmatických potížích a otoku  
při lázeňské a kosmetické proceduře

### **Složení :**

Vnější vrstva: 100% bavlna  
Jádro: 50%polyester, 25%bavlna, 25% polyuretan  
Vnitřní vrstva: 100%bavlna  
Upínání: pásky se suchým zipem

Suchý – teplý zábal ( slouží k prohřátí )

## Návod k použití výrobku

Před použitím výrobku čtěte pozorně příbalový leták.



Výrobek je chráněn patentním úřadem.  
Jeho výroba bez souhlasu majitele patentu je protizákonná.



### Zábalový pás na lokty, kolena, lýtka

#### Napomáhá:

- ✓ při bolestech kloubů
- ✓ při růstových bolestech u dětí
- ✓ při doléčení poúrazových stavů, např. zlomenin
- ✓ při revmatických potížích
- ✓ při zánětu žil (studený obklad nebo aplikace léčivých mastí)
- ✓ při svalové únavě po zátěži



### Návod k použití výrobku

Priessnitzův zábal je krátkodobě studený obklad, který způsobuje hloubkové lokální prokrvení za účelem urychlení hojivých procesů v těle. Neměl by se přikládat na místa infikovaná, špatně se hojící rány, kožní nemoci typu ekzém apod. Priessnitzův zábal je tradicí ověřený a osvědčený přírodní postup, který používaly již naše babičky od dob jeho objevení Vincenzem Priessnitzem (1799 - 1851), zakladatelem tzv. hydroterapie. Priessnitzův obklad je ověřenou procedurou, která napomáhá ke zlepšení prokrvení postiženého místa, a tím k urychlení hojivých procesů v těle a postupné úlevě od nepříjemných pocitů. Jde o studený zapařovací obklad.

#### Jak správně připravit Priessnitzův obklad:

- vnitřní díl zábalového pásu ponořte do studené vody nebo do příznivě působící lázně
- řádně vyždímejte
- provlékněte namočenou část do zábalového pásu
- oviňte pás okolo postiženého místa a upevněte suchým zipem
- suchý - teplý zábal: slouží k prohřátí

*Prosíme dodržujte pokyny v příbalovém letáku.*

Více informací a návodů k dalšímu použití zábalu naleznete na našem e-shopu:  
[www.priessnitzuvzabal.cz](http://www.priessnitzuvzabal.cz)

### Kontakt na prodejce:

**Obchodní zástupce: +420 725 961 975**

**E-mail: [objednavkybok@seznam.cz](mailto:objednavkybok@seznam.cz)**

**Web: [www.priessnitzuvzabal.cz](http://www.priessnitzuvzabal.cz)**

